

Bedienungsanleitung NeuroNation MED

Revision: 9 | Datum: 20.01.2025

Willkommen bei NeuroNation MED!

Entdecken Sie Ihr wahres Potenzial und starten Sie Ihr wissenschaftliches Gehirntraining. Die NeuroNation MED Anwendung wurde entwickelt, um Ihr Gehirn auf vielfältige und spielerische Weise zu trainieren. Wir bieten eine große Anzahl an Übungen, die nicht nur effektiv sind, sondern auch Spaß machen. Unsere Übungen helfen Ihnen, Ihr Gedächtnis, Ihre Verarbeitungsgeschwindigkeit und Ihre Aufmerksamkeit zu trainieren.


NeuroNation MED führt eine Analyse Ihrer Stärken und Potenziale durch und erstellt für Sie einen persönlichen Trainingsplan. Hierbei handelt es sich um gezielte Übungen, die durch wiederholte Durchführung einen oder mehrere kognitive Bereiche Ihres Gehirns stimulieren. Diese Übungen absolvieren Sie in individuellen Sitzungen mit ansteigenden Schwierigkeitsgraden, die an Ihren Trainingserfolg angepasst sind.

NeuroNation MED

Geltungsbereich

Diese Gebrauchsanweisung ist gültig für:

- NeuroNation MED v.1.0.0 oder höher

	<p>ACHTUNG: Lesen Sie sich vor der Anwendung die Anweisung aufmerksam durch. Konsultieren Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder Ihre Therapeutin, Ihren Therapeuten, sollten Sie Fragen oder Unklarheiten über die Benutzung dieser Anwendung haben. Des Weiteren steht Ihnen das NeuroNation MED Support-Team für Anfragen zur Verfügung.</p>
---	--

Funktionsweise

Die NeuroNation MED Applikation ist eine mobile Anwendung für ein computerbasiertes kognitives Training, das auf spielerischen Übungen verschiedener kognitiver Funktionen basiert (Multi-Domain Cognitive Training). Für das Trainieren dieser Fähigkeiten stehen innerhalb der Anwendung vielfältige Übungen zur Verfügung. Diese können einzeln ausgewählt oder innerhalb einer Trainingssitzung personalisiert zusammengestellt und durchgeführt werden.

Dabei vermittelt die Anwendung zudem allgemeine Informationen zu kognitiven Beeinträchtigungen und dem gezielten Training, stellt Entspannungsübungen sowie

Lern Techniken vor und unterstützt Sie bei deren Umsetzung. Zusätzlich bietet die Anwendung Erinnerungsfunktionen, um das Gehirntraining und die Inhalte der Übungen zu vertiefen und im Alltag zu integrieren.

NeuroNation MED ist für die Eigenanwendung bestimmt. Es werden keine Hilfsmittel bei der Anwendung benötigt.

Die NeuroNation MED Anwendung ist geeignet für Anwender*innen ab 18 Jahren mit einer erworbenen oder neurodegenerativen leichten kognitiven Beeinträchtigung.

Nutzungsvoraussetzungen

Für die Benutzung der Anwendung benötigen Sie eine E-Mail Adresse sowie ein internetfähiges Smartphone oder Tablet.

Folgende **Hardware** wird unterstützt:

- iPhone / iPad
- Smartphone / Tablet

Folgende Anforderungen an das **Betriebssystem** bestehen:

- Die Medizinproduktversion 1.* unterstützt:
 - iOS 11.0 oder höher
 - Android 5.0 oder höher
- Ab Medizinproduktversion 2.0.0 wird unterstützt:
 - iOS 15.0 oder höher
 - Android 8.0 oder höher

Zweckbestimmung

NeuroNation MED soll Patienten dabei unterstützen, die Symptome von erworbenen oder neurodegenerativen leichten kognitiven Beeinträchtigungen zu lindern.

Benutzergruppe

Bei diesem Produkt ist der Nutzer der Patient. Das Produkt ist für Patienten ab 18 Jahren geeignet, die an den oben genannten Symptomen leiden und in der Lage sind, ein handelsübliches Smartphone zu bedienen. Der Patient benötigt keine medizinischen Vorkenntnisse für die Nutzung von NeuroNation MED und muss nicht gesondert geschult werden.

Indikation

NeuroNation MED ist indiziert bei erworbener oder neurodegenerativer leichter kognitiver Beeinträchtigung.

Kontraindikation

Für die Anwendung von NeuroNation MED sind keine Kontraindikationen oder Anwendungseinschränkungen bekannt.

Anwendungsdauer


Als Anwendungsdauer wird eine gesamte netto Trainingszeit von mindestens 18 Stunden in jeweils drei wöchentlichen Trainingssitzungen von 30 - 40 Minuten empfohlen.

Vorsichtsmaßnahmen and Warnungen

Vorsicht

Lesen Sie die Anweisungen vor der Anwendung sorgfältig durch. Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Therapeuten, wenn Sie Fragen oder Unsicherheiten bei der Nutzung dieser Anwendung haben. Darüber hinaus steht Ihnen der NeuroNation MED Kundendienst für alle Fragen zur Verfügung.

Warnungen

	<ul style="list-style-type: none">• Mit NeuroNation MED können keine Diagnosen Ihrer Erkrankung gestellt werden. Die App liefert keine Informationen, die dazu bestimmt sind, Entscheidungen für diagnostische oder therapeutische Zwecke zu treffen. Die Anwendung ersetzt keine ärztliche Beratung. Potentiell gefährliche Ursachen einer Erkrankung können hiermit nicht ausgeschlossen werden. Bitte wenden Sie sich bei Fragen bezüglich Ihrer Diagnose an Ihre Ärztin oder Ihren Arzt.• Das Training ersetzt keine medizinische Behandlung. Bitte kontaktieren Sie Ihre behandelnde Ärztin oder Ihren Arzt, sollten Sie eine Verschlechterung Ihrer Symptome feststellen.
---	--

Hilfe

Bei Fragen, Problemen mit der Anwendung oder sollten Sie weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns einfach über das Hilfe-Menü in Ihrer App oder unter info@neuronation-med.com.

Gewährleistung



NeuroNation MED ist ein Medizinprodukt der Klasse I gemäß der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745.

Wenn Sie als Anwender*in oder als behandelnde/r Arzt / Ärztin / Therapeut / Therapeutin eine Verschlechterung des Gesundheitszustands feststellen, welche möglicherweise mit der Benutzung von NeuroNation MED in Verbindung steht, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung.

Rechtliche Hinweise

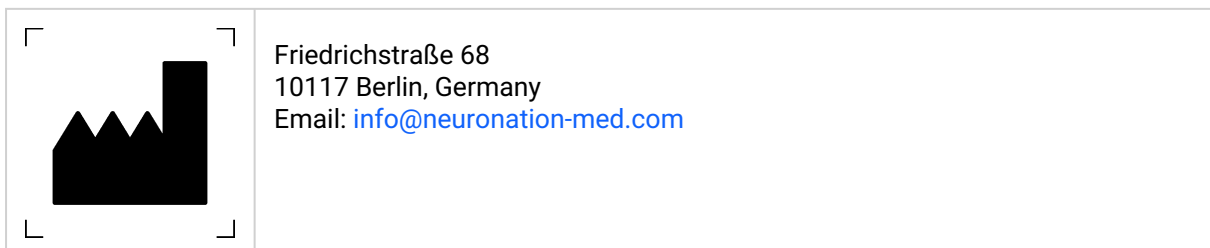
Melden Sie alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle (Schäden, Verletzungen, etc.) an info@neuronation-med.com sowie der zuständigen Behörde.

In Deutschland ist die zuständige Behörde das BfArM. Aktuelle Kontaktinformationen finden Sie auf der Webseite des BfArMs: <https://www.bfarm.de>






Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist der Synaptikon GmbH ein wichtiges Anliegen. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten erfolgt nach den strengen Vorgaben des in der EU und in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Datenschutzrechts unter dem Grundsatz der Datenvermeidung, Datentransparenz und Datensicherheit.

Hersteller

Synaptikon GmbH



Kennzeichnung

Symbol	Erklärung
	Hersteller
	Elektronische Gebrauchsanweisung beachten
	Achtung
	Medizinprodukt
	CE-Kennzeichnung (Communauté Européenne). Produkt erfüllt die zutreffenden Anforderungen aus Anhang I der Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte (MDR).

Sollten Sie eine Papier-Version dieser Gebrauchsanweisung benötigen, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung.